

## הוראות לאיסוף דגימה אפית קדמית


1. וודאו שהערכה מכילה:

- א. מטוש
- ב. מבחנה
- ג. שקית דגימה


2. צפו בצורת האיסוף הנכונה בסרטון: <https://jcma-llc.com/SampleCollection>

3. אספו את הדגימה<sup>1</sup>:


א. הכניסו בזהירות את כל הקצה הרך של המטוש אל תוך נחיר אחד. על ידי שימוש בלחץ מתון, סובבו באיטיות בתנועה סיבובית את המטוש מסביב לקיר הפנימי של הנחיר **ארבע** פעמים. על קצה המטוש לגעת בקיר הפנימי של הנחיר שלכם בכל סיבוב.

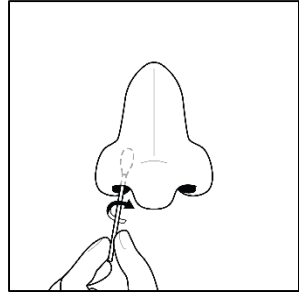


ב. שטפו או חטאו את הידיים. הסירו את המטוש מן האריזה כאשר אתם נוגעים בידית בלבד ונמנעים מן הקצה הרך.

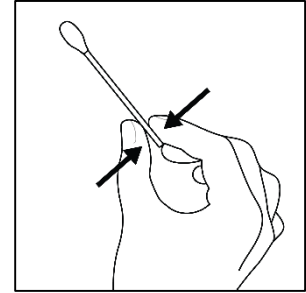

ד. החדירו את כל המטוש, קצהו בתחילה, אל תוך המבחנה. הדקו בחוזקה את המכסה.

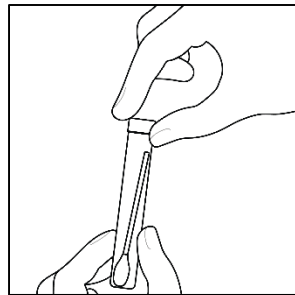

ג. חזרו על אותו ההליך עם **אותו המטוש** בנחיר השני. ההליך צריך לארוך 10-15 שניות בכל נחיר.

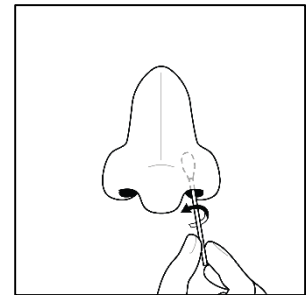

4. הניחו את המבחנה בשקית דגימה. הוציאו אוויר מיותר ואטמו את השקית בביטחה.

5. זרקו את אריזת המטוש. מחזרו את קופסת הערכה.

6. הגישו את הדגימה על פי ההוראות.

<sup>1</sup> סיבוב פשוט של המטוש כנגד צד אחד של פנים הנחיר או השארה של המטוש במשך 10-15 שניות באף עלולים להביא לדגימה לא מספיקה.