


콧구멍 앞쪽 샘플 채취 방법 안내

1. 키트 내용물 확인:


- a. 면봉
- b. 튜브
- c. 표본용 봉지

2. 다음 비디오를 시청하여 적절한 채취 방법 확인: <https://jcma-llc.com/SampleCollection>


3. 샘플 채취:

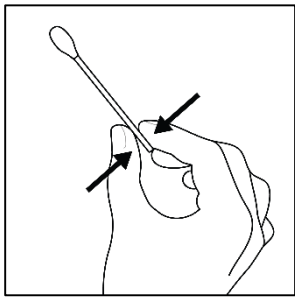


- a. 손을 씻거나 소독합니다. 면봉은 부드러운 끝 부분에 손이 닿지 않도록 손잡이만 잡고 패키지에서 꺼냅니다.

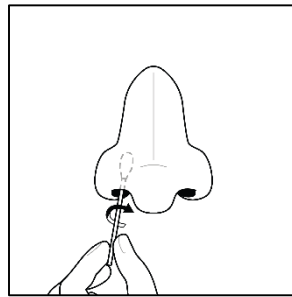

- b. 면봉 끝 부분 전체를 한쪽 콧구멍 안으로 삽입합니다. 가볍게 힘을 주어 콧구멍 안쪽 벽에 대고 면봉을 천천히 4번 돌립니다. 회전할 때마다 면봉 끝 부분이 콧구멍 안쪽 벽에 닿아야 합니다.

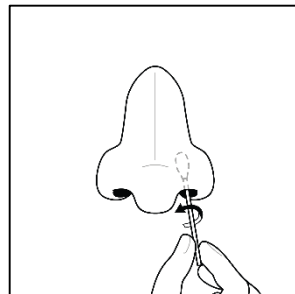

- c. 같은 면봉을 사용하여 다른 쪽 콧구멍에도 같은 과정을 반복합니다. 이 과정은 한쪽당 10-15 초 정도 걸립니다!

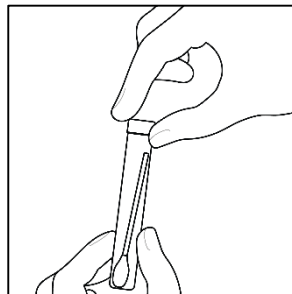

- d. 면봉은 끝 부분이 먼저 들어가게 하여 튜브에 넣습니다. 마개를 단단히 닫습니다.



4. 튜브를 표본용 봉지에 넣습니다. 들어간 공기를 배출하고 봉지를 단단히 밀봉합니다.
5. 면봉 패키지는 버립니다. 키드 상자는 재활용합니다.
6. 지시에 따라 샘플을 제출합니다.

코 안에서 힘을 주지 않고 면봉을 돌리거나 코 안에 면봉을 10-15 초 정도 방치하는 방식을 사용하면 샘플을 충분히 채취되지 못할 수 있습니다.