


Instruções para coleta de amostras da parte frontal da narina

1. Confirme se o kit contém:


- Haste (swab)
- Tubo
- Saco para amostra

2. Observe a coleta adequada assistindo o vídeo em: <https://jcma-llc.com/SampleCollection>


3. Colete a amostra:

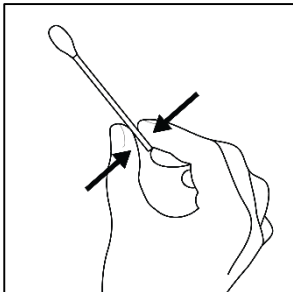


a. Lave ou higienize as mãos. Remova a haste (swab) do pacote, tocando somente na parte inferior da haste e evitando a ponta macia.

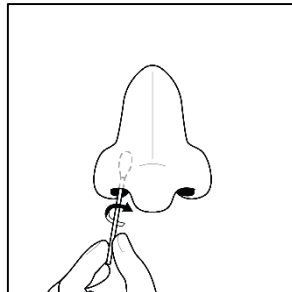

b. Insira gentilmente a ponta macia **inteira** da haste em uma narina. Usando pressão moderada, esfregue a haste lentamente, em movimentos circulares, ao redor da parede interna da narina, **quatro** vezes. A ponta da haste deve tocar a parede interna da narina durante todas as rotações.

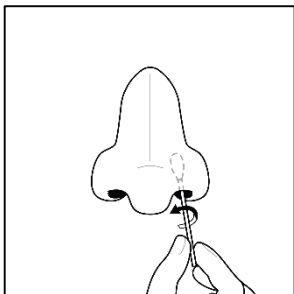

c. Repita o mesmo processo, com a **mesma haste**, na outra narina. O processo deve levar de 10 a 15 segundos por narina.ⁱ

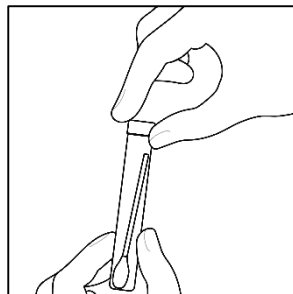

d. Insira a haste inteira, começando pela ponta, no tubo. Feche bem a tampa.

4. Coloque o tubo no saco de amostra. Aperte para retirar o excesso de ar e sele o saco de forma segura.

5. Descarte o pacote da haste. Recicle a caixa do kit.

6. Entregue a amostra conforme instruído.

ⁱSomente girar a haste tocando uma parte do interior da narina ou deixá-la no nariz por 10-15 segundos pode gerar uma amostra insuficiente.