


前鼻腔样本采集说明

1. 确保套装包含：


- a. 拭子
- b. 管子
- c. 标本袋

2. 观看以下网站的视频，观察适当的采集手法：<https://jcma-llc.com/SampleCollection>


3. 采集样本：

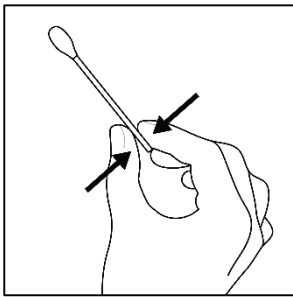


- a. 清洗双手或消毒。将拭子从包装中取出，仅接触手柄，避免碰到拭子头。

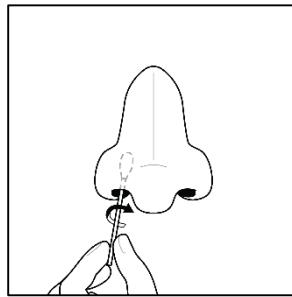

- b. 轻轻将拭子头**整个**插入一边鼻孔。使用适度的压力，缓慢旋转拭子，沿鼻孔内壁做**四次**圆周运动。每次旋转时，拭子头都应触及鼻孔内壁。

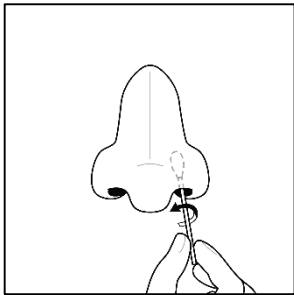

- c. 使用**同一根拭子**插入另一边鼻孔，重复相同步骤。每边鼻孔的采样过程大概需要 10-15 秒。ⁱ

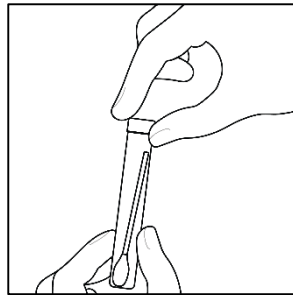

- d. 将整根拭子放入管子，先置入拭子头部分。拧紧盖子。

4. 将管子放入标本袋。挤出多余的空气，将袋子牢牢密封。

5. 丢弃拭子包装。回收工具箱。



6. 按指示上交样品。

仅仅在鼻子内侧某个部位旋转拭子或将拭子放在鼻子中 10-15 秒可能会导致取样不充分。