


## Instrucciones para la recolección de muestras nasales anteriores

1. El kit contiene:


- a. Hisopo
- b. Tubo
- c. Bolsa de muestra

2. Observe la toma apropiada viendo el video en: <https://jcma-llc.com/SampleCollection>


3. Tome la muestra:

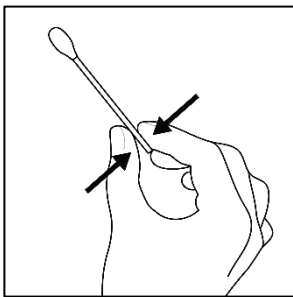


- a. Lávese o desinfecte sus manos. Retire el hisopo del empaque, tocando solo el mango y evitando la punta blanda.

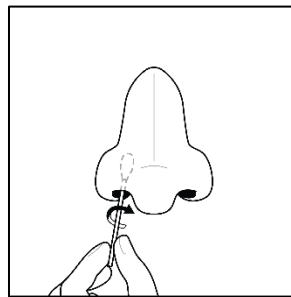

- b. Inserte suavemente **toda** la punta blanda del hisopo en una fosa nasal. Con una presión moderada, frote el hisopo lentamente con un movimiento circular alrededor de la pared interior de la fosa nasal **cuatro** veces. La punta del hisopo debe tocar la pared interior de la fosa nasal en cada rotación.

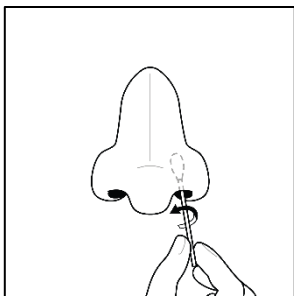

- c. Repita el mismo proceso con el **mismo hisopo** en la otra fosa nasal. El proceso debe tomar de 10 a 15 segundos por fosa nasal.<sup>1</sup>

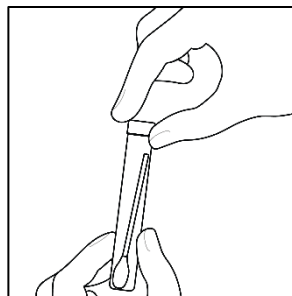

- d. Inserte todo el hisopo, con la punta primero, en el tubo. Enrosque la tapa con fuerza.

4. Coloque el tubo en la bolsa de muestras. Saque el exceso de aire y selle bien la bolsa.

5. Deseche el envase de los hisopos. Recicle la caja del kit.

6. Entregue la muestra como se indica.

---

<sup>1</sup> Simplemente girar el hisopo contra una parte del interior de la nariz o dejar el hisopo en la nariz durante 10-15 segundos puede resultar en una muestra insuficiente.